


【採檢步驟參考】

1. 使用前先確認內容物是否完整及詳讀說明書，各廠牌採檢方式略有差異，仍要注意。
2. 採檢者請先確實洗手消毒並佩戴口罩，請受檢者放鬆心情避免緊張，頭部稍向後仰，讓採檢者方便使用採檢刷進行取樣。
3. 因快篩時，會有咳嗽的反應，受檢者請戴上口罩，口罩遮住嘴巴，露出鼻子。
4. 輕柔且水平角度將採檢刷，深入到鼻腔約 2.5 公分直至遇到阻力即可。
5. 按照說明書指示，以旋轉方式進行，完成一邊後再取樣另一個鼻孔。
6. 將採檢刷放入試管中轉動 3-5 次後靜置一分鐘
7. 取出採檢刷時，將刷頭沿著試管內側轉動，並用手擠壓試管側面，盡可能將刷頭吸附的液體擠出。
8. 滴 3~5 滴萃取液至快篩卡匣，靜待 15 分鐘，快篩結果將出爐
9. 使用後採檢物品，放於夾鏈袋中，確實鎖緊，放置垃圾袋。
10. 取樣完畢後，採檢者與受檢者確實執行消毒動作。
11. 陽性結果拍照，可提供醫療院所參考。

採檢位置示意圖

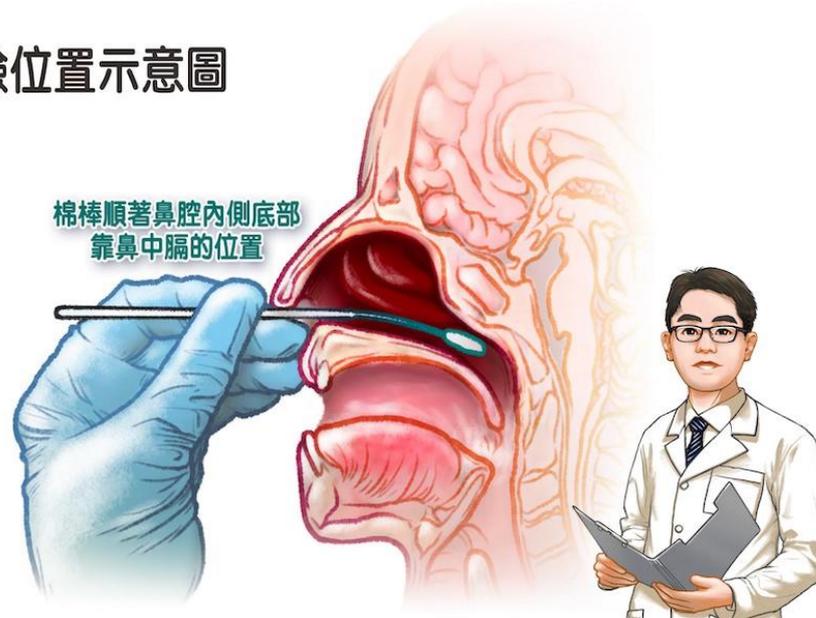

	卡匣	狀態描述	判讀意義
一般狀況		C 線明顯紅線	陰性 無病毒 病毒含量CT值 > 25
		T 線明顯紅線 C 線明顯紅線	陽性 病毒含量CT值 < 25
		T 線明顯紅線 C 線無顯示	無效 無參考價值
特殊狀況		15分鐘內 T 線微弱紅線 C 線明顯紅線	陽性 病毒含量不高
		15分鐘外 C 線明顯紅線 才出現T線微弱紅線	無效 無參考價值